

HYGIENEPLAN

Dr. Ihde Dental AG Tel. 055 293 23 23
 Dorfplatz 11 Fax. 055 293 23 00
 CH - 8737 Gommiswald contact@implant.com



PRODUKT	FÜR	ANWENDUNG	ZUBEREITUNG DER LÖSUNG	HINWEISE
 oneway® Händedesinfektion oder oneway® Händedesinfektions-Gel	Hygienische Händedesinfektion Chirurgische Händedesinfektion	Die Hände mit der Lösung einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten. Die Hände und Unterarme mit der Lösung einreiben und 5 Minuten lang feucht halten.	Gebrauchsfertige Lösung	Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen ungeeignet.
 PLIWA® Biguaton forte Neu Instrumentendesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • ärztliches Instrumentarium • Laborgeräte aus Glas, Porzellan, Metall, Gummi, Kunststoff usw. • thermolabiles Anästhesiezubehör • starre und flexible Endoskope 	Konzentrat mit 30 - 40 ° C warmen Wasser verdünnen. Instrumente nach Gebrauch vorreinigen und in Lösung einlegen. Instrumente gründlich abspülen und trocknen.	Konzentrat Wasserzugabe nötig Einwirkzeit 5 - 60 Min	Geeignet für alle Zirkulationsverfahren und Ultraschallgeräte. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, empfiehlt es sich die Lösung täglich zu erneuern. Wichtig: Die Instrumentenwanne muss vor der ersten Anwendung gründlich gereinigt werden. Sie darf keine Rückstände von anderen Instrumentenlösungen enthalten.
 PLIWA® RotoPren Bohrerdesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • zahnärztliche Bohrer • rotierende Präzisionsinstrumente 	Bohrer sofort nach Gebrauch (ohne Vorreinigung) in Lösung einlegen. Danach Instrumente mit klarem Wasser abspülen und -trocknen.	Gebrauchsfertige Lösung Einwirkzeit 1 - 5 Min	Keine Aluminiumteile einlegen. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Die benutzte Lösung täglich erneuern um die optimale Wirksamkeit zu erzielen.
 PLIWA® Lemon Fresh AF Sprühdeseinfektion Citrus	<ul style="list-style-type: none"> • Flächen • Möbel • Bekleidung 	Auf Gegenstände und Flächen unverdünnt aufsprühen und einwirken lassen. Ggf. die überschüssige Restmenge mit trockenem Einmaltuch entfernen.	Zur Desinfektion von 1 m ² benötigt man 15 bis 20 ml gebrauchsfertige Lösung Einwirkzeit 30 Sek - 5 Min	Nicht anzuwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas und Leder!
 PLIWA® Hygienetücher Fresh Lemon AF	<ul style="list-style-type: none"> • Flächen • Möbel • Bekleidung 	Gegenstände, Oberflächen und Teile gut abwischen und trocknen lassen. Erst nach der Einwirkzeit wieder benutzen.	Gebrauchsfertige Lösung Einwirkzeit 30 Sek - 5 Min	Nicht anzuwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie Acrylglas und Leder!
 PLIWA® Mikroclean Plus D Sauganlagendesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • Absauganlagen 	Mindestens 1- bis 2-mal täglich nach Arbeitschluss pro Absaugstelle mit 1 Liter der frisch hergestellten Lösung durch die zu reinigenden Schläuche etc. saugen.	Konzentrat Wasserzugabe nötig Einwirkzeit 1 - 60 Min	Nicht über Nacht oder länger als 48 Stunden einwirken lassen. Die Gebrauchslösung für jeden Desinfektionsvorgang frisch ansetzen. Nicht mit Zusätzen oder anderen Präparaten mischen!
 oneway® Einwegfilter	<ul style="list-style-type: none"> • Absauganlagen • Separierautomatik • Selektivablagen 	Einwegfilter in die Anlage setzen.		Einwegfilter sollten zweimal wöchentlich gewechselt werden.